

TALKTOOLS® Rensesæt nr. 805

kan anvendes med Purell
desinfektionsmiddel varenr. 2200



Rengøringsvejledning af mundmotoriske redskaber

Indhold:

- 1 stk. 76 cm. flaskerenser
- 1 stk. 17 cm. dobbeltbørste
- 1 stk. 1 ml. sprøjte uden nål
- 1 stk. 59 ml. "øresprøjte"

Brug desinfektionsmiddel godkendt til fødevarer for at desinficere mundmotoriske redskaber. Birdhouse forhandler Purell varenr. 2200.

Følg vejledning på desinfektionsmidlet.



Flaskerenseren anvendes til at rense sugerør indvendigt.



Dobbeltbørsten anvendes til grundig rengøring på ydersiden.



Sprøjten anvendes til at sprøjte desinfektionsmiddel gennem sugerør og andre hule redskaber.



Øresprøjten anvendes til tørring ved at der pustes luft ud – samme øresprøjte må ikke anvendes til andre formål.

1. Læg sugerør og øvrige terापiredskaber i varmt sæbevand for at opløse rester af drikkeelse, mad eller mundvand. Flaskerenseren føres frem og tilbage i sugerør for at rense indvendigt.
2. Dobbeltbørsten bruges til rengøring på ydersiden af Bideblokke, sugerør, mundstykker på fløjter samt øvrige redskaber (undtagen fløjte nr. 9, 11 og 12, som ikke tåler vand). Skyl med rent vand.
3. Desinfektionsmiddel anvendes til slut efter rengøring med sæbevand ved at suge desinfektionsvæske ind i sprøjten og sprøjte det gennem sugerør og hulrum eller ved at spraye direkte på alle flader af redskaberne. Purell desinfektionsmiddel skal virke i min. 30 minutter.
4. Brug øresprøjten til at puste fugtdråber ud for indvendig tørring af sugerør og redskaber med hulrum.



Birdhouse

Birdhouse® er dansk distributør af TalkTools®